

ワンステップ・HIV1&2簡易検査キット

取扱説明書

病院に行く必要が無く、自宅で短時間にHIVウイルス感染の有無を確認できるキットです。当検査キットはHIVウイルスに感染した際、体内で作られる抗体「HIV抗体」を検出するものになります。通常HIV抗体が正しく検出されるのは感染の疑いから約90日後と言われています。

▶ HIV検査を受けるべき方

AIDS/エイズ（後天性免疫不全症候群）を起こすHIVウイルスは誰にでも感染する可能性があります。感染初期の症状は風邪の症状に似ているため、感染に気付かずにウイルスが潜伏期へと入ってしまうことが多くあるのが現実です。以下が主なHIV感染ルートです。

- ・ HIV感染者との避妊具を使用せず性交渉を行う方
- ・ ドラッグ使用時、注射針を繰り返し使用する方
- ・ 安全性に欠ける血液製剤の使用やHIVウイルスに感染した血液での輸血
- ・ HIV感染者である母から子への母子感染
- ・ 医療従事者


▶ 検査を受ける時期は？

感染の疑いから3ヵ月ほど置いてからの検査を推奨します。感染から3ヵ月未満の場合では抗体反応が薄く陰性反応となってしまう可能性があります。

▶ 免責事項

検査を行う際は必ず説明書の書いている内容を確実に実施してください。HIVに感染した血液に触れた可能性があり、且つHIV検査が陰性となった方は必ず3ヵ月後に再検査を行ってください。HIV検査が陽性だった場合はウエスタンブロット法やPCR法などを各地域の保健所等で行う事をお勧めします。

▶ 同梱内容

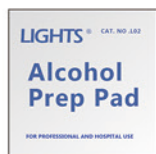

アルコール消毒綿



スポイト



検査液



ランセット



テストカード

注意事項

テストを行う際は説明書の通り確実に行ってください。

このキットは開封後10分以内に使用してください。

キットは使い捨てになります。繰り返しの利用はできません。

キット使用後は各自治体の分別方法で処理してください。

▶ 使用方法

- キットの入った袋を開封し、中にあるアルコール消毒綿を取り出します。


- 採血をする指をアルコール消毒綿で拭き、消毒してください。


- キャップカバーを180度捻じりながら引き抜きます。


- 消毒した指の腹に押し当てて、ボタンを押すと針が指に刺さり血が出ます。


- スポイトを使い、血液を2滴採取します。


- 採取した血液をサンプル用窓に垂らします。


- 検査液の蓋を開け、ゆっくりと2滴ほどサンプル用窓に垂らします。この時検査液はコントロールラインに触れるようにしてください。



- テスト結果は15分以内にあらわれます。



結果の確認は15分以内に確認してください。

▶ 検査結果の確認方法について


C T

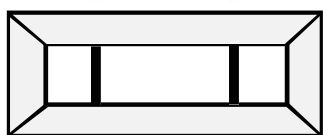

陽性 (+)

HIV抗体反応が検出されました
(CとTの上にピンクの線)


C T

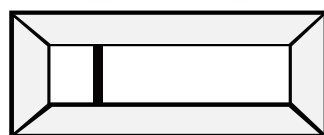

陰性 (-)

HIV抗体反応は検出されませんでした
(Cの上だけにピンクの線)

C T

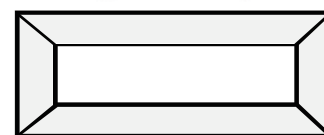

テスト失敗

正しく検査を行う事ができませんでした
(CとTどちらにも線が出ない)